

# A Untergestell Advantage / A Chassis Advantage




## **Ankipphebel**

Montageanleitung – Zubehör



## **Tip assist**

Assembly instructions – Accessory

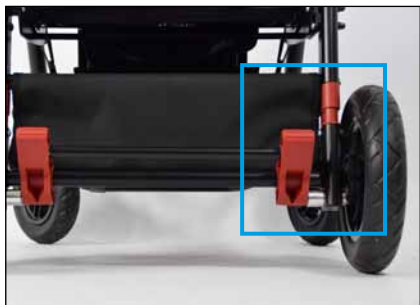

1



2



3



4



5



6



7

Der Ankipphebel wird auf der rechten Seite des Hinterrahmens montiert (Abb. 1). Die Schraube, die Hinterrahmen und Querstange miteinander verbindet, ist mit Loctite gesichert (Abb. 2). Wir empfehlen die Schraubverbindung mit einem Föhn zu erwärmen, um sie einfacher zu lösen.

Nun schieben Sie die Ankipphilfe von außen auf den Hinterrahmen. Klappen Sie den unteren Teil der Ankipphilfe gegen den Hinterrahmen. Achten Sie darauf, dass die Bohrung in der Ankipphilfe über der Bohrung für die Schraube liegt (Abb. 3). Schrauben Sie Ankipphilfe und Querstange wieder gut fest (Abb. 4). Zum Sichern der Schraube ist Loctite 2701 zu verwenden.

Abbildungen 5 bis 7 zeigen die Ankipphilfe angebaut am Untergestell und in Benutzung.

Beim Anbringen der Ankipphilfe an die **Variante „Crash“** sollten Sie auf folgendes achten: Der Aufkleber, der auf die hintere Crash-Öse hinweist, sitzt im Bereich des Ankipphebels und wird beim Anbringen des Hebels verdeckt. Deshalb sollten Sie den beiliegenden neuen Aufkleber gut sichtbar oberhalb der angebrachten Ankipphilfe auf den Rahmen kleben.

The tip assist is mounted on the right side of the rear frame (fig. 1). The screw that connects the rear frame with the horizontal tube is secured with Loctite (fig. 2). Our recommendation is to heat the screw with a hairdryer to loosen the screw easier.

Slide the tip assist from the outside onto the rear frame. Push the lower part of the tip assist against the rear frame. Please ensure that the hole in the tip assist and the hole for the screw are aligned (fig. 3). Tighten the screw to connect tip assist and frame (fig. 4). Use Loctite 2701 to secure the screw.

Figures 5 to 7 show the tip assist mounted on the rear frame and in use.

When attaching the tip assist to an A chassis Advantage **with transit tie down system**, please mind the following instructions: The sticker, which marks the rear crash-eyelet, will be covered by the tip assist. Therefore, please use the new enclosed sticker and stick it visible above the tip assist onto the rear frame.



Mitglied in der Internationalen  
Fördergemeinschaft für Kinder-  
und Jugendrehabilitation e.V.

---



# Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany  
Phone: +49 (0)47 61 / 88 60 · Fax: +49 (0)47 61 / 886-19 · [info@thomashilfen.de](mailto:info@thomashilfen.de) · [www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)