


# Ersatzteilliste / Spare parts list

## Swifty

Art. 9800068065000

Stand / status: 2023-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations











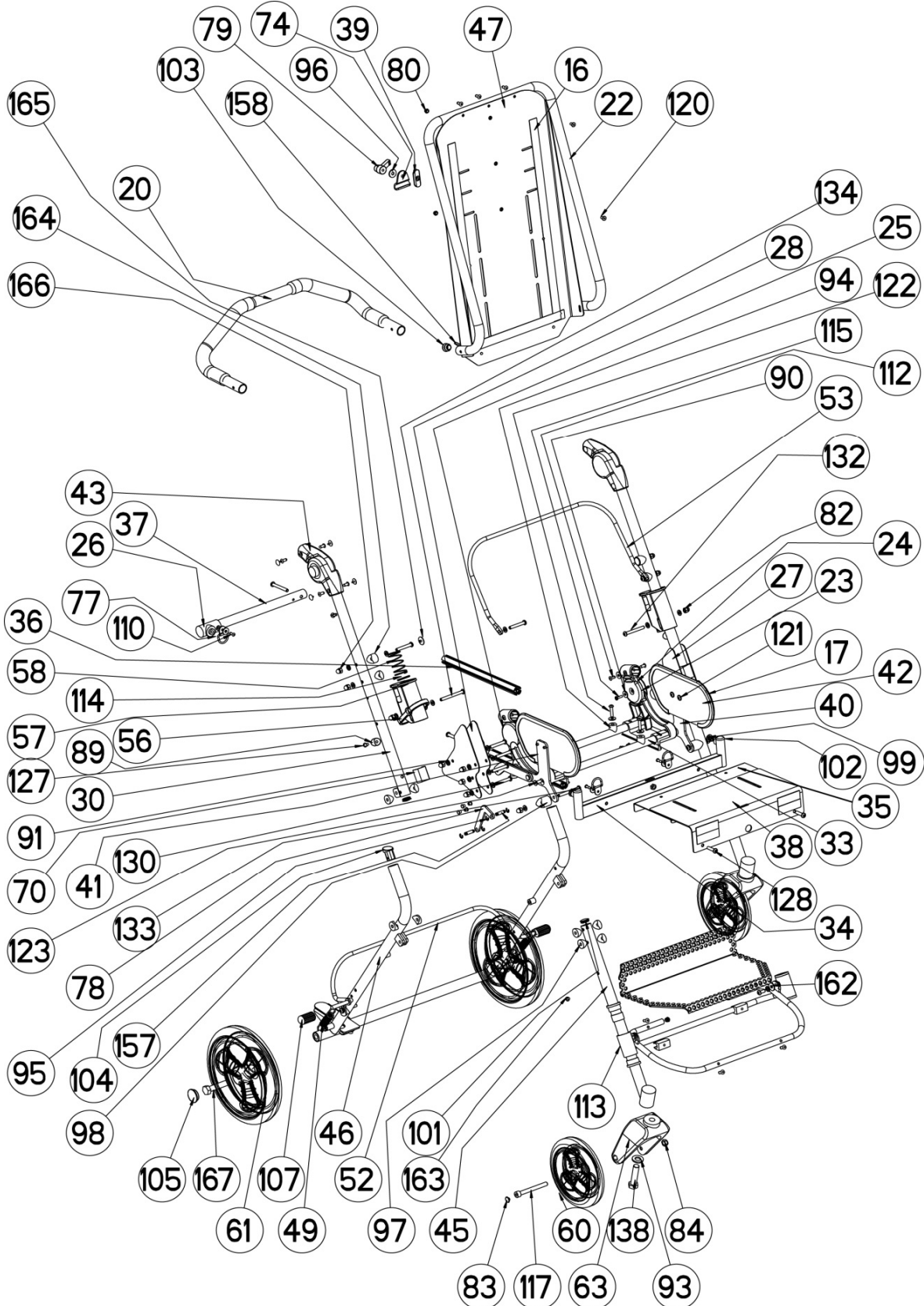


# Ersatzteilliste / Spare parts list

## Swiftly

Art. 9800068065000

Stand / status: 2023-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

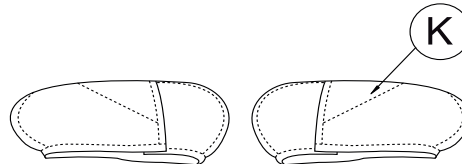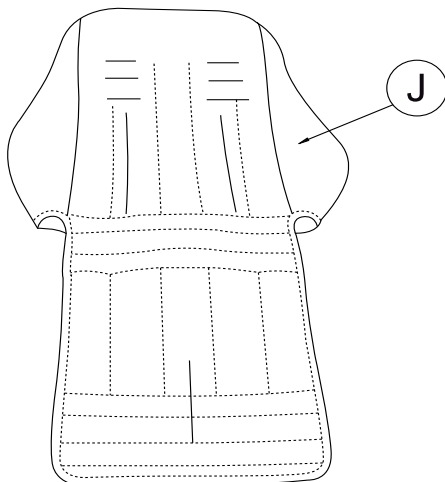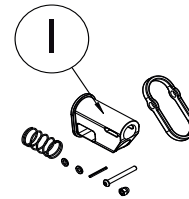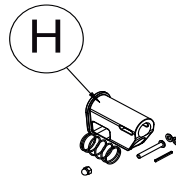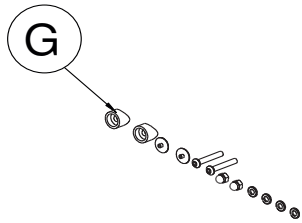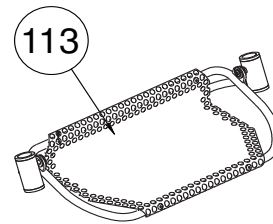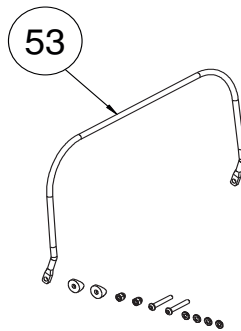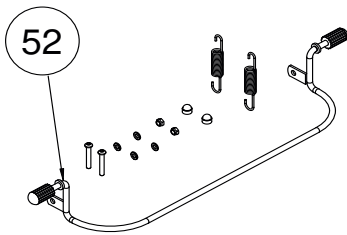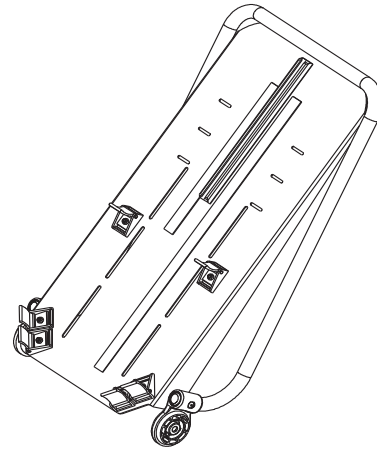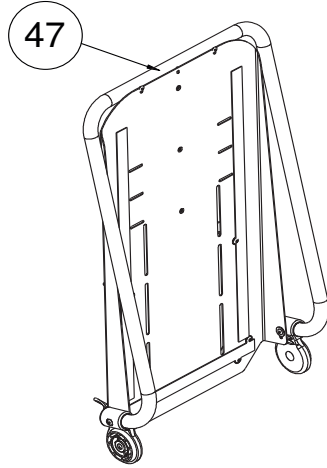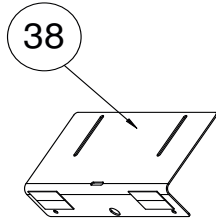

# Ersatzteilliste / Spare parts list

## Swiftly

Art. 9800068065000

Stand / status: 2023-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in USD / All recommended prices in USD

\* auf Anfrage / on request

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity	empf. VK-Stückpreis / Retail price per piece
G	9007003579005	<b>Rückenwinkel Begrenzer</b>	<b>Hip angle limiter</b>	2	\$ 5,66
H	9700680720000	<b>Entriegelung komplett</b>	<b>Unlocking device complete</b>	1	\$ 13,14
I	9700680750000	<b>Entriegelung mit Bügel</b>	<b>Unlocking device with bracket</b>	1	\$ 77,80
J	5005100119905	Rückenpolster	Backrest upholstery	1	\$ 137,62
K	5005124119905	Sitzseitenpolster	Lateral seat upholstery	1	\$ 40,89
L	9700665340000	Ersatzgurtschloss inkl. Beckengurt	Belt buckle incl. pelvic belt	1	\$ 8,21
16	*	Klettband Haken	Velcro, stiff	2,6	*
17	7502023009905	Kantenschutzprofil	Edge protection profile	2	\$ 8,04
20	9007003280000	<b>Baugruppe Schiebebogen</b>	<b>Push bar Swiftly with grip rubber</b>	1	\$ 75,90
23	7502000009905	Gelenk Rückenwinkel	Joint back angle	2	\$ 4,19
24	7502002019905	Seitenteil links	Side support left with drilling	1	\$ 5,62
25	7502003019905	Seitenteil rechts	Side support right with drilling	1	\$ 5,66
26	7502022009905	Stabilisator Eckverbinder	Stabilizer corner connection	2	*
27+28	9007003080000	<b>Baugruppe Swiftly Gestellabdeckung</b>	<b>Frame cover</b>	1	\$ 51,56
30	9007003250000	Handrohr	Hand tube	2	\$ 205,35
33	9007003220000	Sitzaufnahme	Seat adapter Swiftly	2	\$ 49,36
34	9007003247022	Quertraverse	Horizontal cross arm	1	\$ 103,73
35	6800002030000	Sitzplatte fest	fix seatplate	1	*
36	6800004020000	Führungsprofil Sitz	Guidance profile	2	\$ 14,48
37	6800008060000	Griffbogen Swiftly komplett	Hand bar	1	\$ 17,29
38	6800022030000	<b>Baugruppe verstellbare Sitzplatte</b>	<b>Construction kit adjustable Seat plate</b>	1	\$ 16,16
39	9700680140000	Schieber f. Rückenplatte	Slider backrest	1	\$ 18,54
40	9007003447022	Schere links	Scissors, left	1	\$ 69,63
41	9007003457022	Schere rechts	Scissors, right	1	\$ 66,60

## Ersatzteilliste / Spare parts list

42	6800048090000	Seitenführung	Side support	2	\$ 19,32
43	9700680350000	<b>Baugruppe Gelenk Schiebegriff</b>	<b>Construction kit joint pushbar</b>	1	\$ 17,12
45	6800006027022	Vorderrohr	Front tube	2	\$ 71,23
46	9007003307022	Hinterrahmen	Rear frame	1	\$ 305,75
47	9007003310000	<b>Baugruppe Rücken</b>	<b>Construction kit back</b>	1	*
49	9700664530000	Bremsfeder	Brake spring	2	*
52	9007003200000	<b>Bremse</b>	Brake	1	\$ 142,24
53	9007003569005	<b>Bügel - Rückenverstellung</b>	<b>Backrest adjustment bow</b>	1	\$ 30,26
56	9700664290000	Bügel für Entriegelung	Bracket for unlocking	1	\$ 2,59
60	9700668290010	EVA-Rad R 180 vorne BJ 14, grau	Front wheel EVA R 180, gray	2	\$ 33,28
60	9700668299005	EVA-Rad R 180 vorne, schwarz	Front wheel EVA R 180, black	2	\$ 37,30
61	9700668289005	EVA-Rad R 250 hinten, schwarz	Rear wheel EVA R 250, black	2	\$ 56,40
63	9700668250000	Swiftly Vorderradgabel Kunststoff	Plastic fork for front wheel	2	\$ 25,50
70	9700680450000	Klemmschalengleiter	Locking shell glider	2	\$ 0,56
74	6800008820000	Klemme Rückenbügel	Locker, backrest bow	1	\$ 8,04
77	6800027000000	Halbrundring gebohrt mit Schlaufe	Half round ring drilled with loop	4	\$ 2,33
78	6800008800000	Hebel Gestell	Lever frame	2	\$ 12,49
79	7502013999005	Klemmhebel fest mit Innengewinde M6	Release lever with inside thread M6	1	\$ 6,05
80	6900000541000	Selbstsichernde Mutter DIN 985 M5	Self-locking nut DIN 985 M5	2	\$ 0,04
82	6900040649005	Hutmutter DIN 1587 M 6 x 12, verzinkt schwarz	Head nut DIN 1587 M6x10	14	\$ 0,09
83	6730121089905	Innensechskant Schutzkappe M8	Hexagon socket protection cap M8	2	\$ 0,17
84	6900000841000	Selbstsichernde Mutter DIN 985 M8	Self-locking nut DIN 985 M8	2	\$ 0,17
89	6970820169007	Distanzstück Swiftly Kst Ø 16 mm	Plug hand tube	2	\$ 2,07
90	6970000050001	Scheibe ISO 7093 5,3-15x1,2	Washer ISO 7093 5,3-15x1,2	8	\$ 0,04
91	6970000060000	Scheibe ISO 7090 B 6,4-12x1,6	Washer ISO 7090 B 6,4-12x1,6	28	\$ 0,04
93	6970000120000	Scheibe ISO 7090 A 13-24x2,5	Washer ISO 7090 A 13-24x2,5	2	\$ 0,13
94	6970000650000	Profilscheibe 5,3-15x10	Profil washer 5.3-15x10	4	\$ 0,13
95	6970100050000	Sicherungsscheibe DIN 6799 Ø 5	Locking washer DIN 6799 Ø 5	8	\$ 0,04
96	6970000670000	Scheibe ISO 7093 PA 6,4-18x1,6	Washer ISO 7093 PA 6,4-18x1,6	3	\$ 0,17
97	6970000750000	Profilscheibe Kst 6,3-20x3	Profil washer 6.3-20x3	20	\$ 0,13
98	6970820207022	Distanzstück 1 Profil Alu 20 mm	Spacer	2	\$ 11,41
99	7502016009905	Stopfen Gewindebohrung	Plug tap hole	2	\$ 0,35
100	7502016109905	Zierstopfen für Blindbohrung	Plug tab for hole	8	\$ 0,17
101	7502016129905	Stopfen Rohr flach	Plug for tube, plane	4	\$ 0,78
102	7502017009905	Stopfen Quertraverse	Plug cross arm	2	\$ 0,17
103	7502018009905	Lamellenstopfen 20x0,8-2,5	Blade plug 20x0,8-2,5	2	\$ 0,13
104	7502019029905	Kunststoffstopfen schräg	Plastic plug	2	\$ 0,65

## Ersatzteilliste / Spare parts list

105	9700676480000	Nabenabdeckkappe, schwarz	Wheel cap black	2	\$ 0,91
107	9700667260000	Bremsgummi	Brake rubber	2	\$ 2,12
110	6970401050000	Blindniete DIN 7337 A 4,0x10	Blind rivet DIN 7337 A 4,0x10	4	\$ 0,04
112	6970501450000	Blindniete DIN 7337 A 5,0x14	Blind rivet DIN 7337 A 5,0x14	11	\$ 0,09
113	9007003187022	<b>Baugruppe Fußstütze Effekt 7</b>	<b>Footrest Swifty Effect 7</b>	1	\$ 284,87
115	6910401420000	EJOT -Schraube WN 1411 KB 4,0x14	EJOT screw WN 1411 KB 4,0x14	2	\$ 0,39
116	6930601000000	Gewindestift DIN 916 M6x10	Grub screw DIN 916 M6x10	2	\$ 0,09
117	6930807550000	Zylinderschraube DIN 912 M8x75	Cylinder head screw DIN 912 M8x75	2	\$ 0,91
120	6930501030000	Senkschraube ISO 10642 M5x10	Countersunk-head screw ISO 10642 M5x10	2	*
121	6930500820000	Linsenschraube ISO 7380-MS M 5 x 8	Fillister head screw M5x8	4	\$ 0,13
122	6930502522000	Linsenschraube ISO 7380 M5x25	Fillister head screw M5x25	4	\$ 0,09
123	6930601620000	Senkschraube DIN 7991 M6x16	Countersunk-head screw M6x16	4	\$ 0,13
127	6930602022000	Linsenschraube ISO 7380 M6x20	Fillister head screw ISO 7380 M6x20	4	\$ 0,09
128	6930602522000	Linsenschraube ISO 7380 M6x25	Fillister head screw ISO7380 M6x25	2	*
130	6930604022000	Linsenschraube ISO 7380 M6x40	Fillister head screw ISO 7380 M6x40	14	\$ 0,13
132	6930605022000	Linsenschraube ISO 7380 M6x50	Fillister head screw ISO 7380 M6x50	2	\$ 0,17
133	6930605522000	Linsenschraube ISO 7380 M6x55	Fillister head screw ISO7380 M6x55	3	\$ 0,35
138	6931205540000	Sechskantschraube DIN 931 M12x55 (Vorderrad)	Hexagon bolt front/rear wheel (front wheel)	4	\$ 1,82
157	6070270000000	Gelenkbolzen 6x15,5	Joint pin 6x15,5	4	\$ 2,81
158	5900082020000	Schließer für Gurt gebohrt	Closer for belt, drilled	6	\$ 2,46
162	6970000690000	Scheibe DIN 7093 PA 6,4-12x1	Washer DIN 7093 PA 6,4-12x1	4	\$ 0,04
163	6970500840000	Blindniete DIN 7337 A 5,0x8,0	Blind rivet DIN 7337 A 5,0x8,0	1	\$ 0,09
164	6970816079005	Sattelstück KST 6,3-20x10	Spacer plastic 6,3-20x10	2	*
165	6730101109005	Kappe	Cap	2	*
166	6900010641000	Selbstsichernde Hutmutter M6 DIN 986	Self-closing head nut M6 DIN 986	2	*
167	6931206540000	Sechskantschraube DIN 931 M 12 x 65 (Hinterrad)	Hexagon bolt DIN 931 M 12 x 65 (rear wheel)	2	\$ 2,03
	9007050229005	Beschläge Wetterdach Swifty Paar	Fittings for sun and rain cover (pair) Swifty	1	\$ 16,42
	6970820120000	AL-Distanzstück Swifty Vorderrad-Befestigung	Spacer Swifty Rolko front wheel	2	\$ 4,67
	6930528260000	Sterngriff Soft Touch M5 D=28mm H=25mm	star knob soft touch M5	2	\$ 7,09
	9700664281000	Swifty Crashöse vorne inkl. Radfeststeller	Swifty front crash eye incl. wheel locks	2	\$ 19,88
	9700664421000	Swifty Crash-Öse hinten Gr. 1	Swifty rear crash eyelet size 1	2	\$ 13,49
	9700664473001	Zugschnäpper f. Radfeststeller, roter Kunststoffkopf	Locking pin for wheel lock, red plastic head	2	\$ 11,71