

Q chassis · ThevoTherapy



Schiebegriff

Montageanleitung – Zubehör



Push bar

Assembly instructions – Accessory



1



2



3

Der Schiebegriff erleichtert das Schieben im Innenbereich.

Zur Montage zunächst die acht Bohrstopfen hinten links und rechts am Untergestell entfernen (je Seite zwei Bohrstopfen oben und unten). (Abb. 1)

Nun den Schiebegriff links und rechts mit den beiliegenden Schrauben, Unterscheiben und selbstsichernden Muttern befestigen. (Abb. 2)

Der höhenverstellbare Bereich des Schiebegriffs muss nach hinten zeigen. (Abb. 3)

HINWEIS:

Selbstsichernde Muttern verlieren ihre Funktion, wenn sie nach dem Festziehen wieder gelöst werden. Wir empfehlen, im Falle einer Demontage bei Wiederanbringung der Schiebegriffaufnahme neue selbstsichernde Muttern zu verwenden.

ACHTUNG:

Keine Gegenstände an den Schiebegriff hängen! Es besteht erhöhte Kippgefahr. Der Griff ist nur zum Schieben des Untergestells gedacht.

The push bar facilitates indoor use. Mounting: Remove the eight tube plugs left and right at the rear of the chassis (two tube plugs each on top and bottom on either side). (Fig. 1)

Now, mount the push bar left and right, using the screws, washers, and locknuts provided. (Fig. 2)

Make sure the height adjustable part of the push bar points rearwards. (Fig. 3)

NOTE:

Locknuts lose function when loosened. In case of dismantling the locknuts, we recommend using new ones when reattaching the push bar receivers.

CAUTION:

Do not attach any items to the push bar! This increases the risk of tipping. The grip must only be used to push the chassis.



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.



Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com